
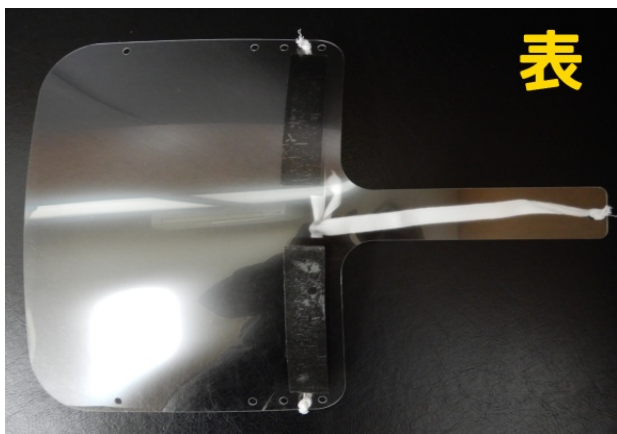


フェイスシールド **しんちゃん** 取扱説明書

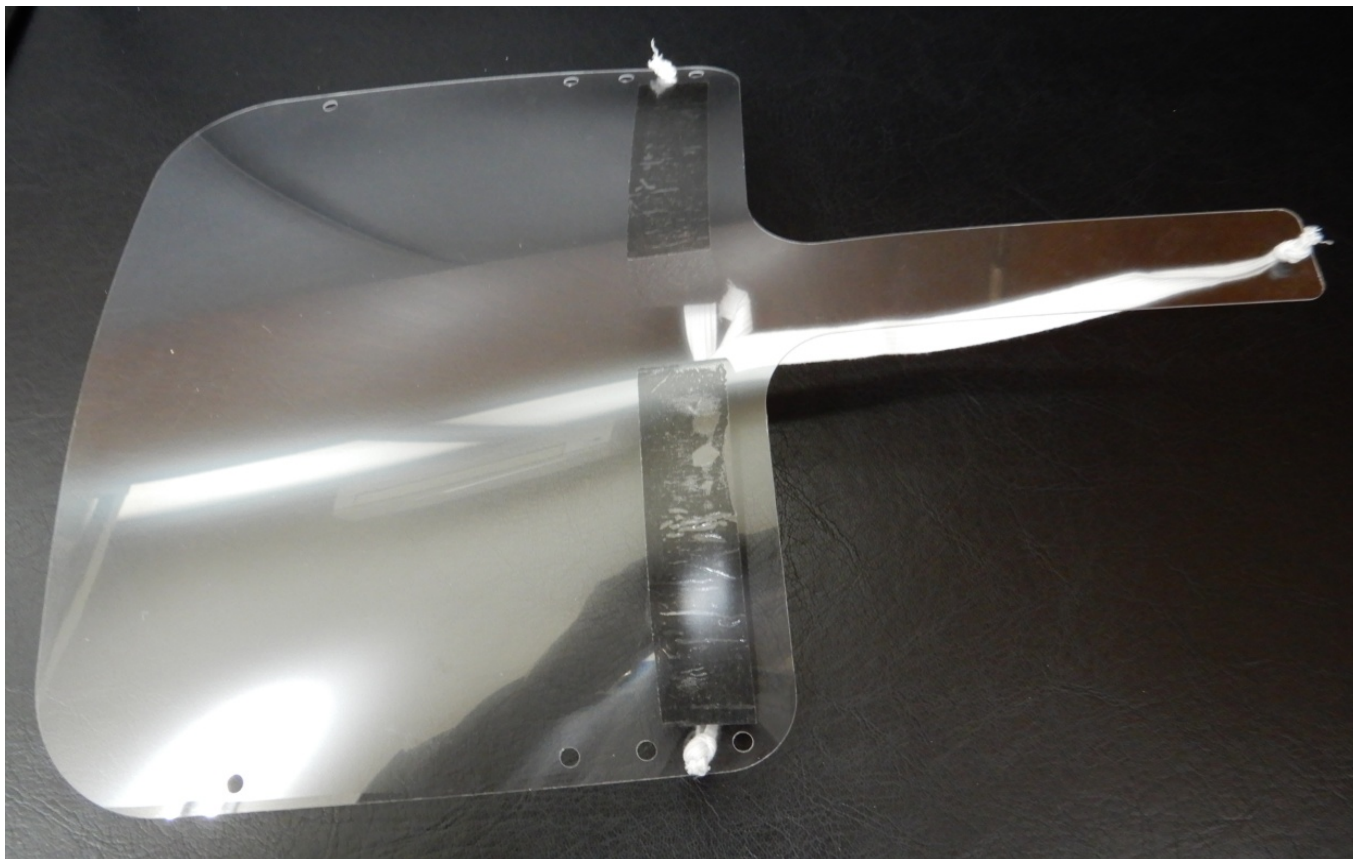

- ・ 当社の取引先にご協力を頂き、製作コストを、極力抑えて製作した簡易型フェイスシールドです。
- ・ 顔にあたるスポンジ部分は、皮脂や汗が付着致しますので、共有の使用は避けて下さい。
- ・ ゴム紐はかるく結んでありますので、長さ調整の上、使用中に外れないように、しっかり固定し、ご使用下さい。（万一、ゴム紐の長さが足りない場合、新しいゴム紐のご用意、取付をお願いします。）
- ・ スポンジ部分を支点にして、横ゴム紐の位置を変えることで、顔に対してのフェイスシールドの角度が変わります。その上で、縦ゴム紐を引っ張ることで、角度の微調整が可能です。
- ・ 簡易型のフェイスシールドのため、防曇処理をした樹脂板は使用しておりません。フェイスシールド面の曇りが気になる場合、お手数ですが、石鹼水を裏面に塗って下さい。曇り止めの効果があります。

製作 株式会社 大場商会 TEL:03-3670-0378

ご協力いただいている会社

株式会社 ハイテック (八王子市)

[フェイスシールド面の材料をご提供頂きました。]

株式会社 ティアンドティ (江戸川区)

[構成部材のご提供をして頂きました。]

シールド面に、希に擦りキズのついている場合がございます。本来の製品の見切り品の代用のため、ご容赦下さい。